
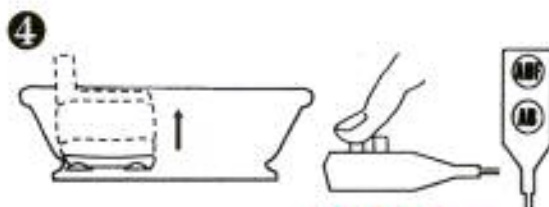
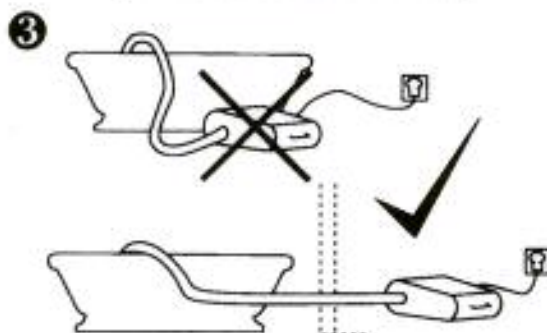
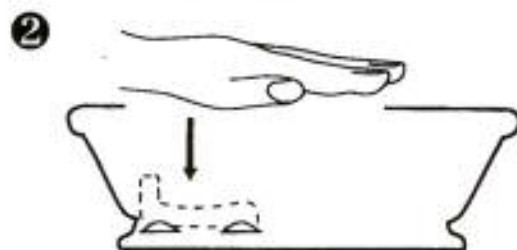


Bath-Buddy

Schnellstartanweisungen

1. Das Kissen so in der trockenen, sauberen Badewanne positionieren, dass die Saugnapf-Laschen nach außen weisen.
2. Festen Druck auf jeden Saugnapf aufbringen, um sicherzustellen, dass das Kissen an der Badewanne haftet.
3. Die Gebläseeinheit außerhalb des Badezimmers aufstellen (außer wenn diese professionell installiert worden ist - siehe Anweisungen für feste Verdrahtung), den Netzstecker in die nächste Steckdose stecken und einschalten.
4. Den HERAUF-Knopf (AUF) am Handbedienungsgerät drücken, bis das Kissen völlig aufgeblasen ist, und die automatische Ausschaltvorrichtung die Gebläseeinheit ausgeschaltet hat.
5. Die Badewanne mit Wasser füllen, wobei heißes und kaltes Wasser gleichmäßig zu vermischen ist (wenn nur heißes Wasser benutzt wird, kann das Kissen beschädigt werden).
6. Lassen Sie sich vorsichtig auf das Kissen gleiten, indem Sie die Beine über die Seite der Badewanne schwingen.

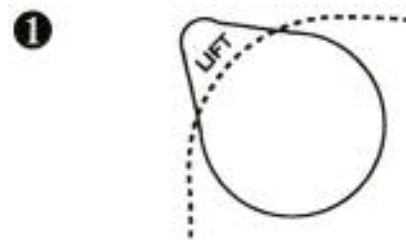


7. Setzen Sie sich so zurück, dass Ihr Kreuz von der Lumbastütze abgestützt wird, und achten Sie darauf, dass Sie in der Mitte des Farbstreifens sitzen.

Das Gleichgewicht halten und leicht nach vorne beugen, und dann den HERUNTER-Knopf (AB) am Handbedienungsgerät drücken, um die Luft allmählich aus dem Kissen abzulassen und den Benutzer in die Wanne zu senken. Falls erforderlich, benutzen Sie die Wannenseiten oder einen Haltegriff, um das Gleichgewicht besser zu halten.




8. Wenn Sie Ihr Bad beendet haben, setzen Sie sich aufrecht hin und lehnen Sie sich etwas nach vorne; drücken Sie dann den HERAUF-Knopf (AUF) an der Handbedienungseinheit, um das Kissen aufzublasen. Achten Sie stets darauf, dass Sie in der Mitte des Farbstreifens sitzen. Drücken Sie so lange auf den Knopf, bis der automatische Druckmessfühler den Motor ausstellt, wenn das Kissen den oberen Wannenrand erreicht.

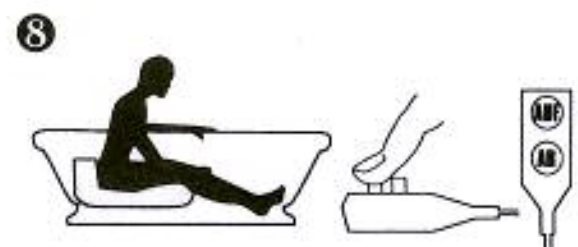

9. Gleiten Sie vom Kissen, indem Sie die Beine über den Wannenrand und aus der Wanne schwingen.



10. Das Kissen mit Hilfe der Hebelaschen an den Saugnäpfen vorsichtig aus der Wanne nehmen. Zur Pflege des Kissens, des Schlauchs und des Bedienungsgeräts sollten diese getrocknet und gereinigt werden, bevor sie zur Aufbewahrung weggelegt werden.

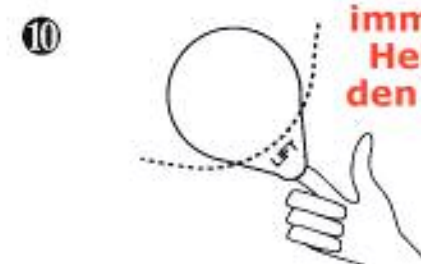

**Wichtig:
immer mit den
Hebelaschen
den Sack lösen**

Hinweis: Das Handbedienungsgerät lässt sich mit einer Hand bedienen. Dadurch bleibt die andere Hand frei, damit man leichter sein Gleichgewicht halten kann. Für erhöhte Stabilität sollte jedoch eine feste Haltestange mit dem Produkt benutzt werden (Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung). Das Produkt kann jederzeit angehalten werden, indem man einfach die Bedienungstasten am Handbedienungsgerät loslässt.

Das Ausreisen der Saugnäpfe ist auf unsachgemäße Handhabung (Temperatur Pkt. 5 und lösen des Kissens Pkt. 10) zurück zu führen und bildet keinen Garantieanspruch.